

CATETER DE DRENAGEM HIDROFÍLICO ONE STEP COM TRAVA DESLIZANTE

Ele foi projetado para drenagem percutânea após a técnica de punção direta.


CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- + O cateter de poliuretano proporciona conforto ao paciente.
- + Sistema de trava de fio foi projetado para prender o pigtail e evitar que deslize o cateter para fora.
- + Com várias configurações de diâmetros de 8fr até 16fr e comprimentos de 30cm.
- + O revestimento hidrofílico quando ativado atrai e retém água e outros líquidos na superfície do cateter, criando uma superfície de baixo atrito.
- + O material utilizado no revestimento hidrofílico é projetado somente para cateteres urinários.
- + Os orifícios laterais são projetados para a drenagem máxima.
- + O diâmetro externo da agulha do estilete se ajusta ao diâmetro interno do tubo de aço inoxidável e a agulha tem uma ponta tri facetada para facilitar a penetração.
- + Opção de ponta Pigtail.

É um procedimento fácil e rápido para o acesso da pelve renal em casos urgentes do rim obstruído, onde há necessidade do desvio urinário.



AMECATH

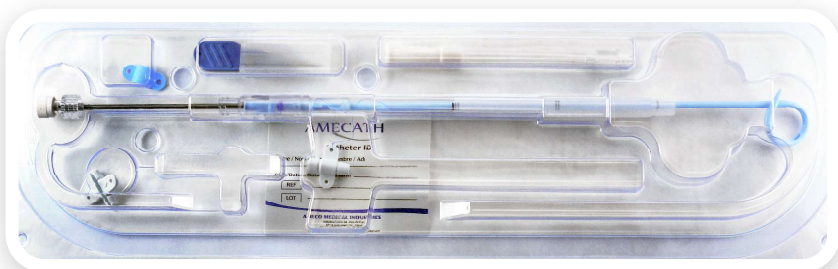

CONTÉM

01 CATETER DE DRENAGEM HIDROFÍLICO

01 AGULHA STYLET


01 TUBO DE AÇO

02 ASAS DE FIXAÇÃO


01 BISTURI

01 TUBO DE CONEXÃO (12FR OU 16FR)


INSTRUÇÕES PARA O MECANISMO QUE TRAVA O FIO

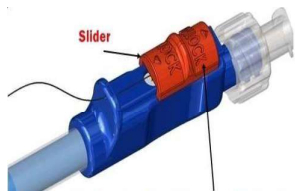

Durante a inserção, o controle deslizante deve estar na posição "destravar"

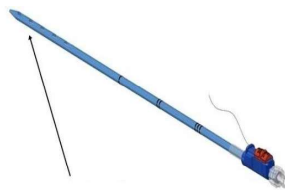


Com o introdutor a ponta ficará reta

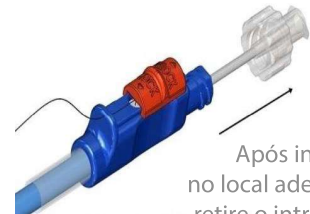


Após inserção no local adequado retire o introdutor



A ponta do cateter retorna para a sua forma original

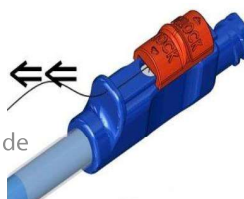

Puxe o fio de sutura

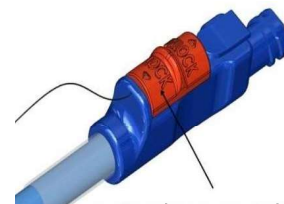

Mude o controle deslizante para a posição "travado"

Anvisa: 81665690026

CHAVE DE CÓDIGO

NEP-XX-YY-J-OS-H-SL

NEP: Cateter de drenagem.

XX: Diâmetro em FR

YY: Comprimento em cm.

J: Ponta Pigtail

OS: ONE STEP

H: Cateter com revestimento Hidrofílico

SL: Sistema deslizante de trava de fio

 **SurgicalMedi**

IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA ME

Rua Flórida, 344 – Barreirinha – Curitiba/PR – CEP 82.560-130

Fone: +55 41 3030 2769

surgicalmedi.com