

KIT NEFROSTOMIA PERCUTÂNEA HIDROFÍLICO COM TRAVA DA PONTA

Utilizado para drenar qualquer coleção cística no interior do corpo, guiado cirurgicamente, graficamente ou por ultrassom nos casos de dilatação do sistema linfático da pelve.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

- + O cateter de poliuretano proporciona conforto ao paciente.
- + Sistema de trava de fio foi projetado para prender o pigtail ou Malecot e evitar que deslize o cateter para fora.
- + Com várias configurações de diâmetros de 8fr até 16fr e comprimentos de 30cm.
- + O revestimento hidrofílico quando ativado atrai e retém água e outros líquidos na superfície do cateter, criando uma superfície de baixo atrito.
- + O material utilizado no revestimento hidrofílico é projetado somente para cateteres urinários.
- + Os orifícios laterais são projetados para a drenagem máxima.
- + O fio guia com 100 cm de comprimento e ponta J, tem o núcleo em Nitinol e revestimento PTFE. Oferece benefícios como grande flexibilidade e anti-quebra, para melhor manuseio durante o procedimento.
- + A cânula possui um estilete com ponta tri facetada que proporciona uma inserção precisa e não danifica o fio guia.
- + Oferecemos com ponta Pigtail ou ponta Malecot.


AMECATH




CONTÉM

- 01 CATETER DE NEFROSTOMIA HIDROFÍLICO
- 01 AGULHA DE PUNÇÃO 18G X 20CM (CÂNULA)
- 01 AGULHA CHIBA 22G X 20CM
- 01 FIO GUIA J EM NITINOL 0.035" X 100CM
- 03 OU 04 DILATADORES
- 01 RETIFICADOR - ENDIREITADOR DO CATETER
- 01 BISTURI
- 01 TUBO DE CONEXÃO
- 02 ASAS DE FIXAÇÃO


INSTRUÇÕES PARA O MECANISMO QUE TRAVA O FIO

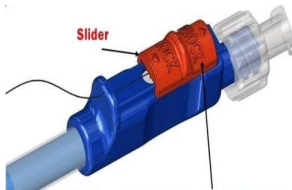

Durante a inserção, o controle deslizante deve estar na posição "destravar"

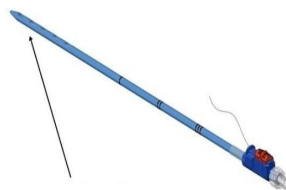


Com o introdutor a ponta ficará reta

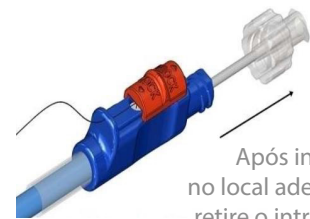


Após inserção no local adequado retire o introdutor



A ponta do cateter retorna para a sua forma original

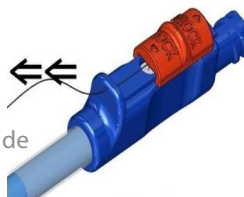

Puxe o fio de sutura

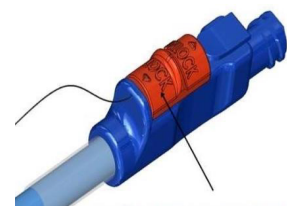

Mude o controle deslizante para a posição "travado"

ANVISA

81665699002 para Kit Nefrostomia Hidrofílico com trava da ponta pigtail
81665699005 para Kit Nefrostomia Hidrofílico com trava da ponta malecot



IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA ME
Rua Flórida, 344 – Barreirinha – Curitiba/PR – CEP 82.560-130
Fone: +55 41 3030 2769

surgicalmedi.com

CHAVE DE CÓDIGO

NEP-XX-YY-T-K-H-SL

NEP: Cateter Nefrostomia.

XX: Diâmetro em FR

YY: Comprimento em cm.

T: Tipo de ponta: J para ponta Pigtail
ou M para ponta Malecot

K: Kit completo

H: Cateter com revestimento Hidrofílico

SL: Sistema deslizante de trava de fio