

BOWIE & DICK CLEAN TEST – PACOTE PRONTO

REF: 352

Indicador químico pacote pronto (ISO 11140-1:2006, Tipo 2 ISO 11140-4:2007) para monitoramento diário do sistema de pré-vácuo em esterilizadores a vapor com bomba de vácuo. Indicado para detectar a presença de ar residual, gases não condensáveis, vazamentos na câmara, avaliar a penetração de vapor e detectar falhas no funcionamento da bomba de vácuo.

Parâmetros Críticos de Processo

Temperatura: 121° C

Temperatura: 134° 137° C

Tempo: 15 minutos

Tempo: 3,5 minutos

Instruções de Uso: Após o ciclo de pré-aquecimento, coloque o teste Bowie & Dick Clean Test na bandeja mais baixa sobre o dreno. O esterilizador deve estar vazio. Executar um ciclo de esterilização normal conforme os parâmetros críticos de processo. Após o final do ciclo, aguarde 10 minutos para resfriamento do pacote. Retire o pacote do esterilizador e remova a folha de teste que está no centro da embalagem, examine o resultado. Um padrão de marrom/preto com uma área amarela perto do centro da folha de teste representa uma condição de remoção de ar inaceitável. O resultado aceitável deve ser um padrão uniforme de marrom/preto.



Livre de Chumbo.

Composição: Pacote desafio + 64 folhas (Equivalente ao teste de 7kg do Bowie & Dick) + 1 folha Bowie Dick interna + Indicador de passagem externo.

Medidas: 104mm x 84mm x 20mm

Fabricante: Clean-Up Brazil Biotecnologia Ltda - CNPJ 05.161.206/0001-17. **Responsável Técnico:** Daniel Davi Gruchinski. CRQ IX 09203188

Registro no MS. Produto não considerado "Produto para Saúde" conforme RDC 185/2001 - ANVISA

SurgicalMedi Importadora e Distribuidora de Materiais Cirúrgicos Ltda ME
Rua Flórida, 344 – Barreirinha – Curitiba/PR CEP 82.560-130 / Phone: +55 41 3030 2769 /
Mobile: +55 41 9 9679 8613 / www.surgicalmedi.com